

พรีอกซิมา, พรีอกซิมา พลัส

คำแนะนำการใช้งาน

พรีอกซิมา, พรีอกซิมา พลัสคืออะไร และใช้สำหรับอะไร:

พรีอกซิมา, พรีอกซิมา พลัส เป็นระบบถุงรองรับสิ่งขับถ่ายแบบ 1 ชั้น สำหรับใช้ในผู้ป่วยที่มีทวารเทียมระบบทางเดินอาหาร และทวารเทียมระบบทางเดินปัสสาวะทางหน้าท้อง ผลิตภัณฑ์มีทั้งในรูปแบบ:

- ถุงรองรับอุจจาระปลายปิด มีตัวรอกกลิ้งและระบายแก๊สในตัว สำหรับใช้ในผู้ป่วยที่มีลำไส้ใหญ่เปิดหน้าท้อง
- ถุงรองรับอุจจาระปลายเปิด มีตัวหนีบปลายถุงชนิดอ่อนแบบใช้ครั้งเดียว หรือชนิดแข็งแบบใช้ซ้ำ ปลายเปิดของถุงกว้างสะดวกต่อการระบายสิ่งขับถ่าย เช่น อุจจาระ ถุงประเภทนี้มีทั้งแบบมี และไม่มีตัวรอกกลิ้ง
- ถุงรองรับปัสสาวะปลายเปิด มีวาล์วระบายเปิดปิดได้ มาพร้อมข้อต่อเอนกประสงค์ (H-I-J) สำหรับต่อเข้ากับถุงเก็บสิ่งขับถ่ายแยกชนิดกลางคืน

อาจใช้ผลิตภัณฑ์ถุงรองรับสิ่งขับถ่าย พรีอกซิมา, พรีอกซิมา พลัสควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังรอบช่องเปิดหน้าท้องของ บี. บราวน์

วัตถุประสงค์การใช้และข้อบ่งชี้

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้สำหรับรองรับและเก็บอุจจาระหรือปัสสาวะในผู้ป่วยที่มีช่องเปิดลำไส้หน้าท้องหรือทวารเทียม ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ใช้กับผิวหนังหรือเยื่อเมือกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาหรือการเปลี่ยนแปลงภายหลังการเกิดโรคหรือบาดแผล

ถุงรองรับอุจจาระแบบปลายปิดสำหรับใช้ในผู้ป่วยที่มีลำไส้ใหญ่เปิดหน้าท้อง; ถุงรองรับอุจจาระแบบปลายเปิด ใช้สำหรับอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำ สำหรับใช้ในผู้ป่วย

ที่มีลำไส้ใหญ่หรือลำไส้เล็กเปิดหน้าท้อง; ส่วนถุงรองรับปัสสาวะ สำหรับใช้ในผู้ป่วยที่มีรูเปิดปัสสาวะทางหน้าท้อง

ประโยชน์ทางคลินิกและประสิทธิภาพ:

ช่วยให้ผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้อง ซึ่งสูญเสียความสามารถในการกลั้นอุจจาระ/ปัสสาวะมีชีวิตที่ง่ายขึ้น

กลุ่มผู้ป่วย:

ผู้ป่วยผู้ใหญ่ หรือผู้ป่วยเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป ที่มีทวารเทียมระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินปัสสาวะ

ข้อห้ามใช้

ไม่มีข้อห้ามใช้ในการใช้ถุงรองรับสิ่งขับถ่าย

ไม่แนะนำให้ใช้ถุงรองรับสิ่งขับถ่ายแบบปลายปิด พรีอกซิมา, พรีอกซิมา พลัสกับผู้ป่วยที่มีลักษณะอุจจาระเหลว

อาการข้างเคียงหรือความเสี่ยงหลงเหลือ

อาการไม่พึงประสงค์บริเวณผิวหนังรอบช่องเปิดลำไส้อาจเกิดขึ้นได้ ขณะใช้ถุงรองรับสิ่งขับถ่าย พรีอกซิมา, พรีอกซิมา พลัส

ขณะใช้ถุงรองรับสิ่งขับถ่ายแบบปลายเปิด สิ่งขับถ่ายอาจรั่วไหลออกทางตัวรอกกลิ้งได้

1. การเตรียมผิวหนัง

- ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มขั้นตอนปฏิบัติ
- ทำความสะอาดช่องเปิดลำไส้และผิวหนังรอบ ๆ ด้วยน้ำอุ่น หลีกเลี่ยงการใช้ อีเทอร์ แอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์ใช้เฉพาะที่อื่น ๆ เนื่องจากอาจทำให้ ประสิทธิภาพของการเกาะยึดของแป้นติดหน้าท้องลดลง แล้วซับให้แห้งด้วยผ้า นุ่มไม่เป็นขุย

2. การติดถุงรองรับสิ่งขับถ่ายเข้ากับแป้น: (ถุงแบบปลายปิดและปลายเปิด)

สำหรับถุงรองรับสิ่งขับถ่ายแบบปลายเปิด ให้ปิดช่องเปิดที่ปลายถุงโดย

- ถุงแบบปลายเปิดที่มีตัวหนีบบนแบบกาว: ให้ลอกกระดาษปิดแถบกาวออก (ระวังอย่าให้นิ้วสัมผัสแถบกาว) ติดลงที่ด้านล่างของปลายเปิดให้ตรง (ที่ด้านนอกของถุง ไม่ใช่ด้านที่หันเข้าผิวหนัง) ระยะห่างระหว่างตัวหนีบบนและด้านล่างปลายเปิด ควรเท่ากับความกว้างของตัวหนีบบน (E) ม้วนพับปลายถุงกลับหลังด้วยตัวหนีบสี่ ครั้ง (F) กดตัวหนีบบนกับปลายถุงให้แน่นเพื่อปิดปลายถุงให้แน่นสนิท (G)
- ถุงแบบปลายเปิดที่มีตัวหนีบบนแบบแข็งในผลิตภัณฑ์ พร็อกซิมา พลัส: กดสลักของตัวหนีบบนเพื่อเปิดออก วางตัวหนีบบนด้านบางเหนือปลายถุงเล็กน้อย (K), พับปลายถุงขึ้น และกดปิดตัวหนีบบน (L-M)
- ถุงรองรับปัสสาวะ: หมุนวาล์วระบายในทิศทางตามเข็มนาฬิกาเพื่อตรวจสอบว่า ปลายถุงปิดอยู่ (I)

ตัดแผ่นแป้นบริเวณที่มีแถบกาวเคลือบสารไฮโดรคอลลอยด์ตรงกลางให้เป็นรูเปิดตามขนาดช่องเปิดลำไส้ของผู้ป่วย (A) โดยอาจใช้แผ่นวัดขนาดช่วย ไม่ควรตัดเกินขนาดสูงสุดที่กำหนด และควรตัดแป้นให้ใหญ่กว่ารอบช่องเปิดลำไส้ 2-3 มิลลิเมตร เพื่อไม่ให้แน่นหรือทำให้ช่องเปิดลำไส้ได้รับบาดเจ็บ

ค่อย ๆ ดึงแยกถุงรองรับสิ่งขับถ่ายเพื่อให้อากาศเข้าไปด้านในได้ (B)

จับด้านข้างของถุงรองรับสิ่งขับถ่าย (C)

ลอกกระดาษกาวออกจากแป้นด้านที่จะติดกับผิวหนัง โดยวางติดแป้นจากด้านล่าง ทวารเทียมก่อน (C) แล้วค่อย ๆ กดไล่ขึ้นด้านบน เพื่อไม่ให้เกิดรอยย่นหรือมี ฟองอากาศ ใช้มือค่อย ๆ กดรอบแป้น ความร้อนจากมือจะช่วยให้แป้นติดกับผิวหนัง ดีขึ้น (D)

3. การระบายสิ่งขับถ่ายออกจากถุงรองรับสิ่งขับถ่าย

ยืนอยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง จากนั้นระบายสิ่งขับถ่ายโดย

- ถุงแบบปลายเปิดที่มีตัวหนีบบนแบบกาว: ยกปลายถุงขึ้นเล็กน้อย แกะตัว หนีบบนออก คลายทบของปลายถุงรองรับสิ่งขับถ่าย และระบายสิ่งขับถ่าย ออก เมื่อระบายสิ่งขับถ่ายออกหมดแล้วให้รีดสิ่งขับถ่ายที่ยังหลงเหลืออยู่ ออกจากด้านบนลงด้านล่าง ค่อย ๆ เช็ดทำความสะอาดโดยหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าที่เป็นขุย
- ถุงแบบปลายเปิดที่มีตัวหนีบบนแบบแข็ง: ยกปลายถุงขึ้นเล็กน้อย กดสลักเพื่อ เปิดตัวหนีบบน (N) นำตัวหนีบบนออก คลี่เปิดปลายถุง และระบายสิ่งขับถ่ายลง โถส้วม เมื่อระบายสิ่งขับถ่ายออกหมดแล้วให้รีดสิ่งขับถ่ายที่ยังหลงเหลือ อยู่ออกจากด้านบนลงด้านล่าง ค่อย ๆ เช็ดทำความสะอาดโดยหลีกเลี่ยง การใช้ผ้าที่เป็นขุย
- ถุงรองรับปัสสาวะ: หันวาล์วระบายไปหาโถส้วม จากนั้นหมุนวาล์วระบาย ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาจนได้อัตราการระบายสิ่งขับถ่ายที่ต้องการ (H) เมื่อระบายสิ่งขับถ่ายเสร็จแล้วให้ปิดปลายถุงรองรับสิ่งขับถ่ายอีกครั้งตามวิธี ข้างต้น

4. การใช้ข้อต่อเอนกประสงค์

การใช้ข้อต่อเอนกประสงค์เพื่อเชื่อมต่อถุงรองรับสิ่งขับถ่ายกับถุงรองรับสิ่งขับถ่ายแยก ของ บี. บราวน์ นั้นให้กดที่ปีกทั้งสองข้างของตัวต่อ แล้วสอดเข้าไปที่วาล์วปลายถุง รองรับสิ่งขับถ่าย (J) แล้วเปิดวาล์วโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาครึ่งรอบเพื่อใช้ปัสสาวะ

ไหลไปยังถุงรองรับสิ่งขับถ่ายแยกของ บี. บราวน์ (H) ในการปลดตัวต่อระหว่างอุปกรณ์ ให้หมุนปิดวาล์วที่ปลายถุงรองรับปัสสาวะทางหน้าท้องก่อน โดยหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาครึ่งรอบ และนำตัวต่อออก โดยกดที่ปีกทั้งสองข้างที่ตัวข้อต่อ

5. การใช้สติกเกอร์ปกป้องตัวกรอง

ก่อนอาบน้ำ ให้ติดสติกเกอร์ปกป้องตัวกรองกลิ้ง โดยติดครอบช่องเปิดระบายแก๊ส (O) เพื่อคงประสิทธิภาพการทำงานของตัวกรอง หลังจากอาบน้ำเสร็จแล้ว ให้ลอกสติกเกอร์ออก

ให้ติดสติกเกอร์ปกป้องตัวกรองครอบช่องเปิดระบายแก๊ส ในกรณีที่ใช้งานถุงรองรับสิ่งขับถ่ายแบบปลายเปิดในแนวนอน (เช่นการใช้งานในเวลากลางคืน) (O) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสิ่งขับถ่ายผ่านตัวกรอง เปลี่ยนถุงรองรับสิ่งขับถ่ายเมื่อกลับมาใช้งานถุงรองรับสิ่งขับถ่ายในแนวตั้งเหมือนเดิม

6. การนำผลิตภัณฑ์ออก

ดึงแป้นติดหน้าท้องออกจากด้านบนลงด้านล่าง โดยใช้มืออีกข้างกดบริเวณทวารเทียมไว้เบา ๆ

** ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ*

หากพบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทวารเทียมทางหน้าท้องหรือบริเวณผิวหนังโดยรอบ กรุณาติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสภาพของท่าน

ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแห่งชาติว่าด้วยการทำลายวัสดุที่อาจติดเชื้อ

ขนาดบรรจุ: 30 ชิ้น/กล่อง



คำเตือน: การใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้ครั้งเดียวซ้ำ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ป่วยได้ อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน หรือลดประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์ลงได้ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์แบบหมุน ตัวหนีบบนแบบแข็งเท่านั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (ตัวหนีบบนแบบทวนสามารถใช้ได้ครั้งเดียว) ซึ่งต้องตรวจสอบทุกครั้งก่อนใช้งานและสามารถใช้งานได้ 1 เดือนเท่านั้น หากพบว่าตัวหนีบบนเสื่อมสภาพให้เปลี่ยนทันที อุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายไม่สามารถนำมาใช้งานซ้ำได้

MD เครื่องมือแพทย์ตามข้อกำหนด 2017-745/EU

STOP ✂ ไม่ควรตัดผลิตภัณฑ์เกินเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด

✂ ตัดเส้นผ่านศูนย์กลางให้พอดีก่อนใช้งาน

☀️ เก็บให้พ้นจากแสงแดด

☂️ เก็บในที่แห้ง

🕒 วันหมดอายุ

LOT ครั้งที่ผลิต

หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องมือแพทย์ขึ้นควรแจ้งให้โรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ภายในกล่องผลิตภัณฑ์

เดือนปีที่แก้ไขเอกสาร: 08-2021

